

NYA

CLIKSTAR[®]

SNABBGUIDE




SANOFI DIABETES 

Du har just blivit ordinerad insulin från Sanofi i flergångspennan ClikStar.

I denna snabbguide hittar du information om hur du använder din ClikStar. Mer utförlig information finner du i den bruksanvisning som följer med din förpackning av ClikStar.

Du kan även ringa 020-52 68 87 och få svar på dina frågor om insulinpennor från Sanofi.

ClikSTAR och dess delar

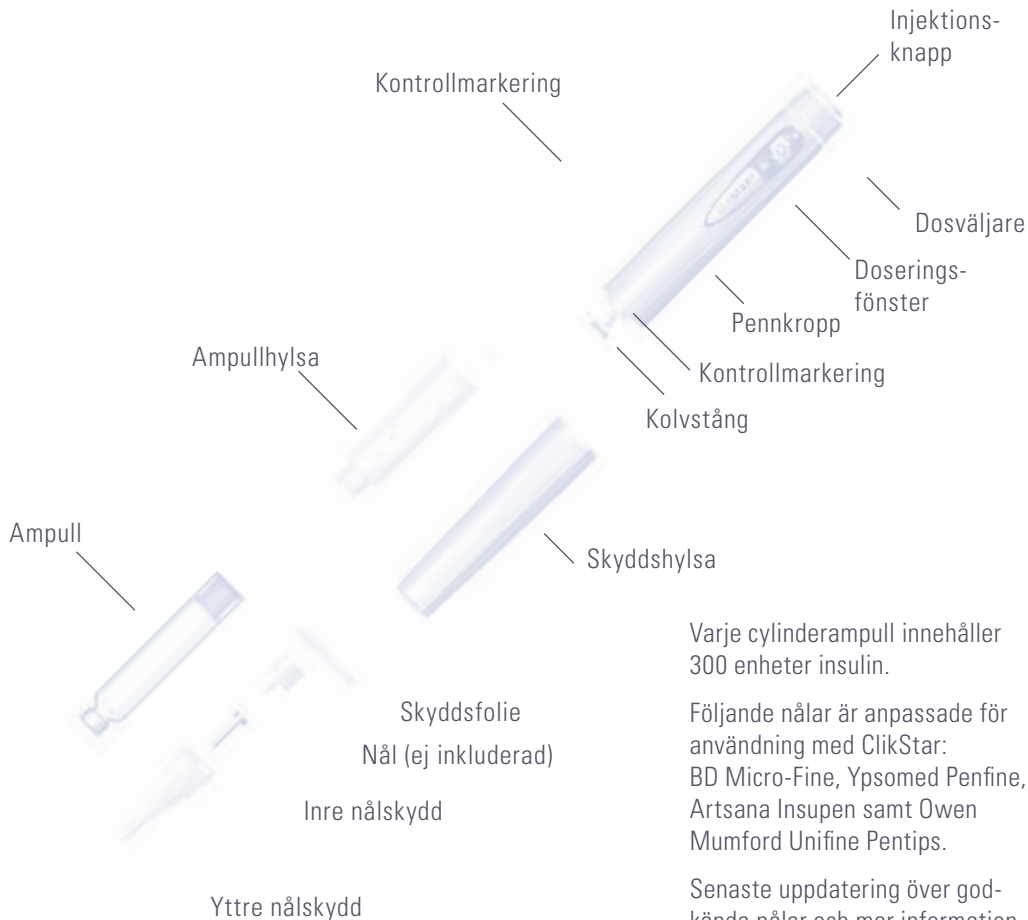


Varje cylinderampull innehåller 300 enheter insulin.

Följande nålar är anpassade för användning med ClikStar:
BD Micro-Fine, Ypsomed Penfine, Artsana Insupen samt Owen Mumford Unifine Pentips.

Senaste uppdatering över godkända nålar och mer information finns på www.insulin.se

Så här börjar du


1 Tag av skyddshylsan. Skruva loss ampullhylsan från pennkroppen. Sätt i en ny cylinderampull i ampullhylsan.

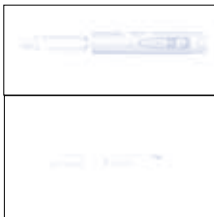


2 Kolvstängens trycks in när ampullhylsan skruvas fast.



3 Skruva tillbaka ampullhylsan tills den "klickar" fast. Se till att kontrollmarkeringarna pekar mot varandra.

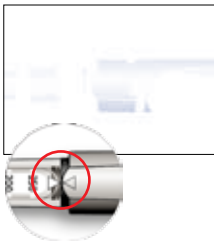

4 Sätt på en nål rakt på pennan. Skruva eller tryck på nålen beroende på vilken nål du använder.

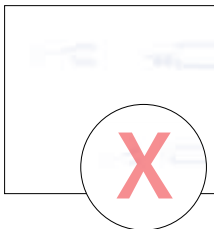


Gör ett säkerhetstest inför varje injektion


5 Välj dosen 2 enheter genom att vrida dosväljaren. Tag av yttre och inre nålskyddet.



6 Håll pennan med nålen uppåt. Tag bort eventuella luftbubblor genom att knäppa med fingret på insulinbehållaren.

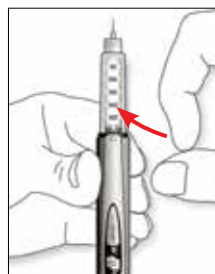

7 Tryck in injektionsknappen hela vägen in. Kontrollera att insulin kommer ur nålspetsen och att dosfönstret visar "0".

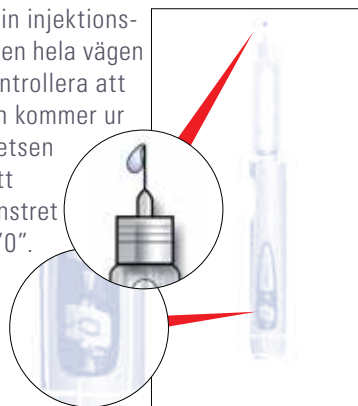


Ställ in dosen och injicera


1 Ställ in den önskade dosen. Vrider du förbi den enhet du skall injicera, är det bara att vrida tillbaka till rätt enhet.



2 Injicera din dos så som din diabetes-sköterska eller läkare har lärt dig. Stick in nålen i huden och tryck in injektionsknappen ända ner till botten. Under tiden du injicerar räknar dosfönstret ner till "0".


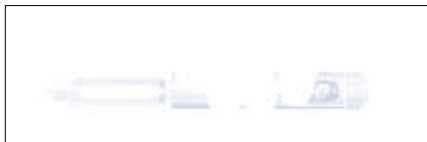


3 Håll kvar trycket på injektionsknappen i nedtryckt läge medan du räknar till 10. Drag därefter ur nålen.

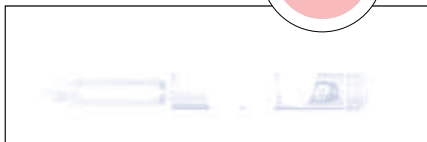

Efter att du injicerat

4 Sätt på det yttre nålskyddet och håll i ampullhysan när nålen tas bort. Kasta nålen som du har blivit anvisad. Sätt på skyddslocket på din KlikStar och förvara den säkert.

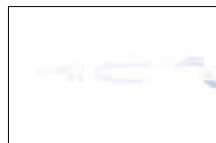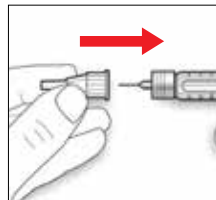

OBS!

Avlägsna alltid nålen efter en injektion och förvara KlikStar utan nål. Detta hjälper till att förebygga nedsmutsning, luftbubblor och insulinläckage.

Tips och råd

Före användning

- Sätt alltid fast en ny nål inför varje användning.
- Kontrollera alltid märkningen på insulinet före användning för att säkerställa att du har rätt sorts insulin.

Vid användning

- Använd aldrig en cylinderampull som är skadad.
- Använd aldrig ClikStar om den är skadad eller ej fungerar korrekt.
- Om du använder olika sorters insulin bör du ha olika färg på pennan för varje insulin.

Kan du inte ställa in önskad dos, kontrollera att det finns tillräckligt med insulin i cylinderampullen. Har du inte tillräckligt med insulin kvar i cylinderampullen kan du välja mellan att:

- injicera vad som finns kvar i cylinderampullen och komplettera din dos med en ny cylinderampull.
- eller använd en ny cylinderampull för att injicera hela dosen.

Vrid aldrig doseringsknappen med våld.

När insulinet börjar ta slut kan du se på cylinderampullens graderade skala ungefär hur

mycket insulin som finns kvar. Denna skala ger ett ungefärligt svar på hur mycket som är kvar och ska inte användas för precis dosavläsning.

Förvaring av din ClikSTAR

- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
- Om cylinderampullen förvaras kallt (t ex i kylskåp), ta ut den 1-2 timmar innan du injicerar för att den ska värmas upp.
- När cylinderampullen börjat användas kan den användas i upp till 4 veckor under normala omständigheter.
- Efter 4 års användning av ClikStar, kassera pennan som du blivit instruerad av sjukvårdspersonal och enligt lokala föreskrifter.
- Skydda din ClikStar från direkt solljus.
- Se insulinets bipacksedel för ytterligare information om förvaring.

Behöver du göra rent utsidan av din ClikStar kan du torka av den med en fuktig trasa. Blöt eller tvätta inte din ClikStar.

Har du frågor om din ClikStar ring oss på vår servicetelefon 020-52 68 87 (öppen dygnet runt).

Frågor om våra insulinpennor: 020-52 68 87

Mer information om diabetes hittar du på www.insulin.se

Du kan också läsa om olika insuliner på www.fass.se

Sanofi AB, Telefon: 08 -634 50 00. www.sanofi.se
Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com
ClikSTAR är CE-märkt.

SANOFI DIABETES 